

Led.Click 

manual



www.ledclick.com.br

SELA BROCA / SELAMIX

A evolução dos broqueiros


*Embalagem de esterilização
organizada e individualizada
para brocas*




INSTRUÇÕES DE USO



01. Inserir as brocas no estojo limpo e seco.
02. Selar com fita cromática 19mm para autoclave.
03. Datar e Nomear brocas separadamente.
04. Esterilizar o estojo na autoclave até completar o ciclo de secagem.
05. Armazenar na gaveta com o escrito para baixo, utilizando das cores para sua organização.

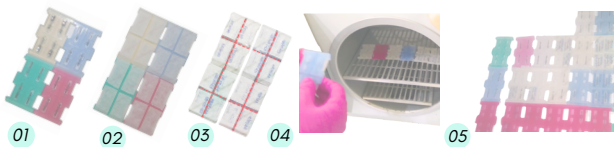

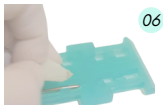

06

06. Para remoção da broca, retirar a fita pelo recorte na cavidade lateral do estojo.



07

07. Utilize da pinça, removendo a broca a ser usada.

MATERIAIS DE MANUSEIO

01. Fita indicadora para autoclave 19mm (cromática)

02. Caneta atóxica de uso hospitalar

03. Suporte para fita adesiva



OBSERVAÇÕES

Caso sua autoclave tenha grelha com espaçamento maior que 1cm usar bandeja perfurada.

Não torcer o estojo de silicone durante o manuseio.

ESPECIFICIDADES

O SELABROCA é utilizado para o armazenamento e esterilização de 4 brocas padrão tamanho de até 26mm de comprimento por 6mm de diâmetro.

O SelaMix é utilizado para o armazenamento e esterilização de 4 brocas padrão tamanho de até 50mm de comprimento por 8mm de diâmetro.



SELABROCA
4 Brocas 26X6 mm

SelaMix
4 Brocas 50x8 mm